

DARCO

**MANUALE
D'USO
BODY ARMOR®
PRO TERM**

INDICAZIONI

Trattamento post-operatorio a seguito di amputazioni Chopart e Lisfranc.

Controindicazioni

Nessuna.

DATI TECNICI

2 misure:

M = lunghezza del moncone 16 cm, L = lunghezza del moncone 19 cm

Ambidestro

Colori: nero, blu

Materiale:

Superficie della suola: TPR

Interno della suola: EVA

Guscio di plastica: PU

Tessuto di rivestimento: Poliestere

Gancio di chiusura: PP

Manutenzione:

Il prodotto non richiede manutenzione.

ISTRUZIONI LAVAGGIO

Lavaggio a mano: se il tutore è poco sporco può essere strofinato con un panno umido o pulito con una spazzola morbida. Per pulire il guscio di plastica ed il rivestimento interno usare acqua tiepida (fino a 30°) e un sapone o un detergente neutro se necessario. Risciacquare ed asciugare subito le parti. Non asciugare il tutore nell'asciugatrice o sui caloriferi. Lasciarlo asciugare all'aria a temperatura ambiente.

ISTRUZIONI D'USO

Body Armor® Pro Term

Ortesi podalica post-amputazione

Figura 1: Aprire le due chiusure dell'ortesi ed estrarre la scarpa interna blu. Aprire le chiusure a velcro della scarpa interna e avvolgere la gamba con la scarpa. Chiudere l'inserito con l'aiuto delle chiusure a velcro. Chiudere prima il velcro sopra il collo del piede e poi il velcro inferiore seguendo i numeri nell'immagine.

Figura 2: Per entrare stabilmente nel tutore, allargare con entrambe le mani la parte mediale e laterale della scocca. Inserire ora le due soles interne nel tutore ed entrare con la scarpa interna blu. Le soles interne possono essere adattate su misura da personale specializzato.

Figura 3: Dopo averlo indossato, inserire le cinghie nelle fibbie e regolare la pressione desiderata. Chiudere le fibbie.



Figura 4: Controllare che la rotellina della valvola sia chiusa in senso orario.

Figura 5: Pompate ora le camere d'aria della scarpa interna blu per mezzo della pompa grigia rotonda sul lato anteriore del tutore. L'aria si diffonde uniformemente. La compressione dovrebbe essere tale che né il moncone né l'articolazione della caviglia possano più muoversi liberamente. La scarpa interna del tutore deve assicurare a sufficienza moncone e articolazione della caviglia.

Figura 6: Se insorgono disturbi della sensibilità, gonfiore o dolori, ridurre la pressione facendo uscire aria dalle camere d'aria. A tal fine girare la rotellina della valvola sopra la pompa in senso antiorario. Se insorgono dolori permanenti, interrompere la riabilitazione e consultare un medico.

4.



5.



6.



ATTENZIONE

Seguire sempre queste istruzioni per l'uso. Il cuscino in espanso deve essere controllato ogni 6-8 ore da personale specializzato per verificare eventuali alterazioni di colore del moncone e la circolazione sanguigna. In presenza di effetti indesiderati (p. es. rigonfiamento della pelle, compressioni, disturbi della circolazione sanguigna ecc.) informare il proprio medico. La protezione ottimale e il funzionamento non sono più garantiti in caso di utilizzo scorretto del dispositivo. Questo ausilio serve alla guarigione e deve essere utilizzato esclusivamente sotto la guida del proprio medico o di personale medico (dietro accordo). La Optima Molliter S.r.l. declina qualsiasi responsabilità in merito. Con la scarpa si consiglia di indossare materiale per la fasciatura o calzini. Sconsigliamo di guidare qualsiasi veicolo mentre si indossa questo ausilio. Prestate estrema attenzione quando scendete o salite gradini (per esempio anche quando salite sul marciapiede) o se camminate su strade non pianeggianti. Procedete più lentamente di quanto non siate abituati a fare. Questo ausilio è un dispositivo monouso.

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO

I materiali assemblati nei prodotti Body Armor® Pro Term sono di tipo parzialmente ecologico e pertanto necessitano di alcuni accorgimenti, nel caso di eliminazione del prodotto. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente. Verificare le normative italiane e locali per lo smaltimento dei prodotti inerti. Il sacchetto di confezionamento deve essere smaltito nella raccolta differenziata della plastica mentre il presente manuale d'uso nella raccolta differenziata della carta.

GARANZIA

La garanzia prestata, riferita ai soli vizi dei materiali impiegati ed ai soli difetti di fabbricazione protegge i prodotti a norma di legge, ivi compresa la sostituzione dell'articolo, ove riconosciuto difettato dall'azienda. La garanzia prestata non ha effetto in caso di:

- danni provocati dal trasporto e non contestati dall'acquirente al vettore al momento della consegna;
- modifica della struttura;
- riparazione della struttura;
- normale usura del prodotto;
- danni imputabili a colpa dell'acquirente, in conseguenza di un uso scorretto e/o improprio del prodotto, di una errata manutenzione o di negligenza nella conservazione dello stesso.

RESTITUZIONE

L'articolo che si assume essere difettato, potrà essere restituito dal rivenditore o dal cliente solo previa autorizzazione della Optima Molliter S.r.l., alla quale dovrà essere inviata unitamente alla confezione originale ed alla prova di acquisto, ed esclusivamente in Porto Franco. Salvo eventuale e riconosciuta responsabilità dell'Azienda, il prodotto sarà restituito dall'Azienda al rivenditore o al cliente in Porto Assegnato.

Classifica del prodotto: classe I Direttiva 93/42 CEE ssiimm

Lotto di produzione: secondo codice apposto su ogni confezione

